

Mise en place d'un étui pénien

PREPARATION


AVANT TOUTE UTILISATION

✳ Utiliser la bonne taille d'étui pénien garantit son efficacité. Pour cela, il faut placer un périmètre à la base de la verge et mesurer le diamètre.

AVANT LA POSE


- ✳ Procédez à une toilette au savon neutre et essuyez délicatement la peau.
- ✳ Les poils du pubis doivent être coupés aux ciseaux (ne pas les raser pour éviter toute irritation).

MISE EN PLACE

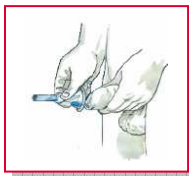


- ✳ Si l'étui pénien est emballé sur un support, retirez-le.
- ✳ Pincez l'extrémité de l'étui pénien entre le pouce et l'index.
- ✳ Etirez légèrement la verge si nécessaire.

...

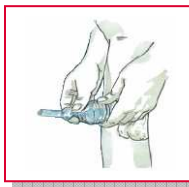


- ✳ Posez l'étui pénien, pincé entre vos doigts, contre le gland non décalotté (permet de laisser un espace de 2 à 3 cm entre le gland et le bout de « l'entonnoir » de l'étui) et déroulez l'étui pénien le long de la verge en évitant la formation de plis.

...

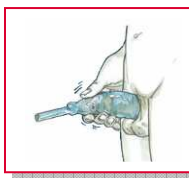

- ✳ Exercez une légère pression sur l'étui pénien autour de la verge de manière à garantir l'étanchéité du système.
- ✳ Une fois l'étui en place, connectez-le à une poche de recueil.

RETRAIT

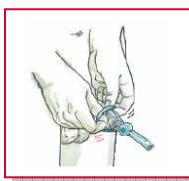

- ✳ Après avoir déconnecté la poche à urine, enroulez l'étui pénien sur lui-même pour le retirer.
- ✳ Lavez votre verge au savon neutre, séchez bien et mettez en place un nouvel étui. S'il y a des restes de colle, ils partiront lors d'un prochain retrait. Il ne faut pas essayer de les retirer en frottant ou en utilisant un produit autre que du savon neutre.



Connexion de l'étui pénien à une poche à urine

DURANT LA JOURNEE : DISCRETION et SECURITE

Pour sortir de chez vous en toute discrétion, gagner en autonomie et bouger sans gêne, il existe des poches de recueil d'urine spécifiques appelées **poches de jambe** ou **poches de jour** qui s'attachent autour de la cuisse ou du mollet.



Elles existent en plusieurs tailles (500ml et 800ml) ; elles possèdent un robinet qui permet de vider discrètement l'urine dans les toilettes et une face interne recouverte d'un voile douceur pour protéger la peau.

LES SYSTEMES POUR ATTACHER LA POCHE A LA JAMBE



- ✳ **Les lanières** réglables en longueur.

Il faut passer les lanières dans les trous situés en haut et en bas de la poche de façon à ce que la partie antiglisse soit en contact avec la peau de la jambe lors de la pose. Ajuster à la taille souhaitée.



- ✳ **Le filet de maintien** (existe en 3 tailles).

Il permet le maintien naturel des poches autour de la cuisse ou du mollet. Il s'enfile comme une chaussette (liseré de couleur vers le haut) et se place sur le mollet ou la cuisse. On glisse ensuite la poche de jambe dans la poche du filet. Il peut être lavé à 30°C. Le filet est particulièrement adapté pour plus de confort et pour limiter l'effet plus serré des lanières. En cas de problème circulatoire, il est conseillé d'utiliser le filet pour éviter l'effet garrot.

POUR LA NUIT : CONFORT et TRANQUILITE

La nuit, pour dormir sereinement, il existe **des poches de nuit** ayant une plus grande capacité (2L), une tubulure plus longue et un système de fixation au lit. Ainsi, vous n'aurez pas à vous lever pour vider la poche et vous pourrez bouger avec une plus grande liberté de mouvement.



**Sortir entre amis ou en famille,
apprendre des choses à nos enfants et petits enfants,
partager des moments inoubliables avec sa compagne...**
**... pour que chaque moment soit vécu intensément,
faites confiance à l'étui pénien InView.**

Trucs et Astuces

En cas de doute sur le diamètre de l'étui, choisissez celui juste au dessus de celui de votre verge.

L'utilisation d'antiseptique, de corps gras ou d'éther sur la verge est à proscrire, afin de conserver une peau saine.

Faites une toilette au savon neutre 1 fois/jour. Séchez la peau.

N'utilisez pas d'étui pénien en cas d'irritation ou de lésion cutanée. Utilisez alors un produit de type collecteur urinaire.

En utilisation habituelle, un étui pénien doit être changé toutes les 24 H.

Etui pénien INVIEW : le bon choix !

Hollister propose une **gamme complète** d'étuis péniers (3 modèles déclinés en 5 diamètres) pour répondre parfaitement aux besoins de chacun :

- **InView Standard** : destiné à l'usage courant.
- **InView Spécial** : destiné aux personnes ayant une verge inférieure à 4 cm.
- **InView Extra** : destiné aux personnes actives dont la transpiration pourrait compromettre la tenue d'un étui pénien standard.

Pose facile avec un étui pénien auto-adhésif à dérouler.



**Vous avez besoin d'un conseil
ou d'un renseignement sur un produit ?**
Hollister est à vous écoute. Contactez-nous :

- Par email : assistance.conseil@hollister.com
- Par internet : www.hollister.fr
- Par téléphone :

N° Vert 0 800 47 92 67

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE



L'attention au Détail. L'attention à la Vie.



Je rentre chez moi avec
un étui pénien Inview