

Gebruiksaanwijzing Externe urinecollector voor vrouwen





EG Vertegenwoordiger: Hollister Incorporated, Libertyville, Illinois 60048 USA
Producent: Hollister ULC, Ballina, Ireland

Hollister en logo is een handelsmerk van Hollister Incorporated,
Libertyville, Illinois 60048 USA.


©1998 Hollister Incorporated. Alle rechten voorbehouden.

905493-A905

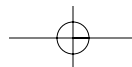


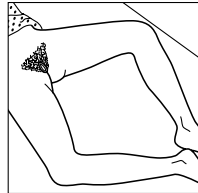


1

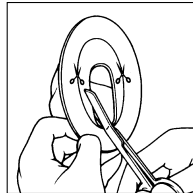


2

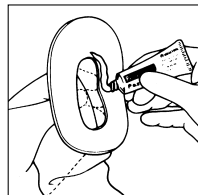


3

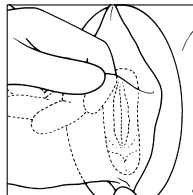

4

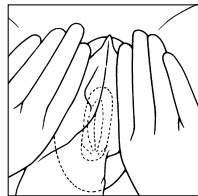

5

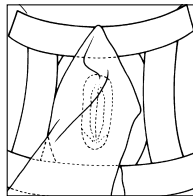

6



7

Vorbereitung en bevestiging

De huid zorgvuldig ontharen, reinigen en goed drogen.

- 1** De patiënte in rugligging brengen en benen laten spreiden.
- 2** De huidplak van de urinecollector bijknippen al naar gelang de grootte van de vulva.
- 3** Bescherm laag van de huidplak verwijderen en een laagje InCare huidpasta aanbrengen tussen de binnen- en buitenrand. Dit dient ter verbetering van de fixatie van de urinecollector.
- 4** Huidplak allereerst bij het perineum aanbrengen en goed aandrukken.
- 5** Vanaf het perineum zorgvuldig de huidplak gelijkmatig naar boven toe aandrukken.
- 6** De randen van de urinecollector worden door middel van de bijgeleverde pleister extra goed gefixeerd.
- 7** De aftap van de urinecollector aansluiten op de verbindings slang van de beenzak.