




Gebbruiksaanwijzing Externe Katheter

CE

 Hollister

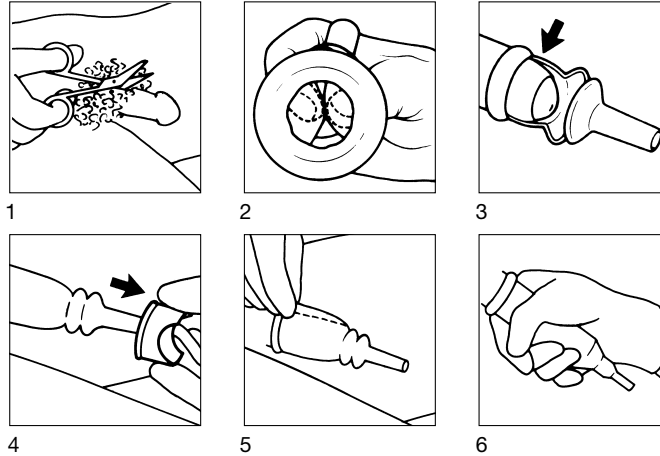

Voorbereiding en bevestiging

Voor het aanbrengen van de zelfklevende anti-reflux katheter de penis wassen en goed drogen. Indien nodig het schaamhaar verwijderen.

- 1** De externe katheter met de duim en wijsvinger op de uitsparing van de aanbreng-ring dichtdrukken en zodanig op de penis plaatsen dat de glans duim en wijsvinger raakt. De aanbreng-ring mag niet verder over de penis schuiven.
- 2** Het terugslagventiel is nu halverwege de glans geschoven.
- 3** De externe katheter helemaal over de penis uitrollen en vast op de schacht aandrukken. Daarna mag de externe katheter niet meer verschoven worden.
- 4** Aanbreng-ring verwijderen. Eventuele lengteplooiën in de externe katheter gladstrijken door met de hand de externe katheter te omsluiten.
- 5** Controleer of de aftap van de beenzak gesloten is. De externe katheter met de verbindingsslang op de beenzak aansluiten.
- 6** Beenzak op de gewenste plaats vastzetten met de twee beenbanden.

EG Vertegenwoordiger: Hollister Incorporated, Libertyville, Illinois 60048 USA
Producent: Hollister ULC, Ballina, Ireland

Hollister en logo is een handelsmerk van Hollister Incorporated, Libertyville, Illinois 60048 USA.

©1998 Hollister Incorporated. Alle rechten voorbehouden.

905488-A905