

Advance



Intermitterende katheter




De catheter is zodanig gemaakt dat hij niet met de handen aangeraakt hoeft te worden. Ons advies is om toch, uit hygiënisch oogpunt, de handen te wassen.



U kunt nu de schaamlippen en de opening van de plasbuis schoonmaken.

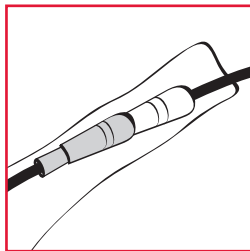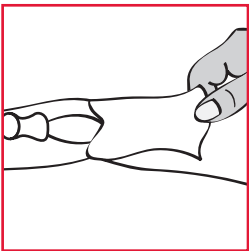


Maak de buitenverpakking los bij de blauwe dop dan kunt U de catheter met omhulsel zonodig direct op een urinezak aansluiten.

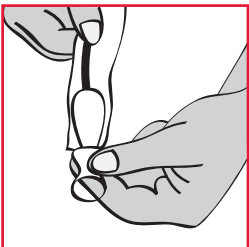

Als U de catheter door het gelreservoir doorschuift tot in de blauwe dop is de catheter klaar voor gebruik.




Verwijder de blauwe beschermkap. Nu wordt de inbrengtip zichtbaar. Deze zorgt ervoor dat de catheter anderhalve centimeter in de plasbuis ingebracht wordt zodat een maximale hygiëne in acht wordt genomen.

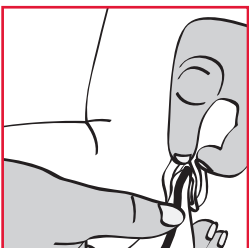


Vervolgens spreidt u de schaamlippen en brengt u de inbrengtip in de opening van de plasbuis totdat deze er helemaal inzit.

Advance


Intermitterende katheter

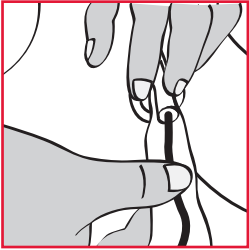

Pak met de hand waarmee U de schaamlippen spreidt, het gelreservoir vast.
Houdt de inbrengtip op zijn plaats.

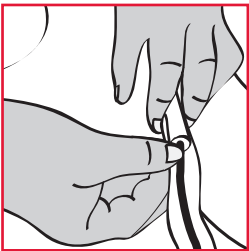

U kunt de afvoerhuls in het toilet of een andere opvangmogelijkheid laten hangen.
Schuif de catheter door de inbrengtip in de blaas totdat er urine gaat stromen.

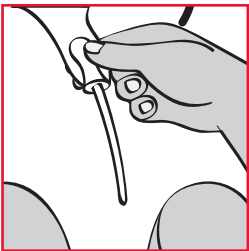

Verwijder de catheter langzaam uit de plasbuis.
Na gebruik kunt U de catheter deponeren in de vuilnisbak.
Nooit door het toilet spoelen!



Hollister
Postbus 2662
3800 GE Amersfoort
Telefoon: (033) 45 01 000
Fax: (033) 45 01 001