


Advance Plus


Intermitterende katheter




De catheter is zodanig gemaakt dat hij niet met de handen aangeraakt hoeft te worden. Ons advies is om toch, uit hygiënisch oogpunt, de handen te wassen.

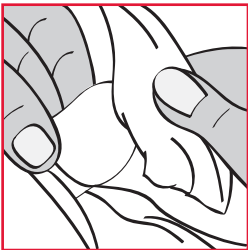


U kunt nu de voorhuid van de penis terugtrekken en de opening van de plasbuis reinigen.

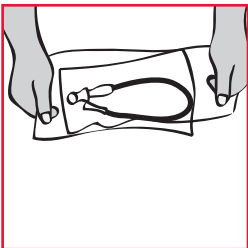


Als U de catheter door het gelreservoir doorschuift tot in de blauwe dop is de catheter klaar voor gebruik.

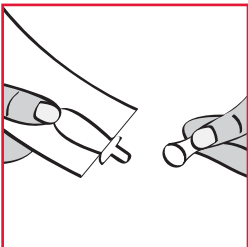

Verwijder de blauwe beschermkap. Nu wordt de inbrengtip zichtbaar. Deze zorgt ervoor dat de catheter anderhalve centimeter in de plasbuis ingebracht wordt zodat een maximale hygiëne in acht wordt genomen.

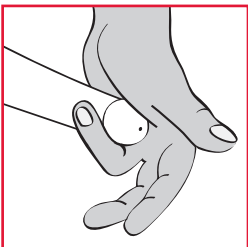


Licht de penis op, houdt hem met de linkerhand cq. de rechterhand met de muis van de hand en ring- en pinkvinger vast.

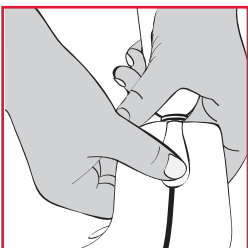


Pak de catheter met de andere hand vast aan de bovenzijde van het gelreservoir en breng de inbrengtip naar binnen, totdat deze zich helemaal in de plasbuis bevindt.

Advance Plus

Intermitterende katheter

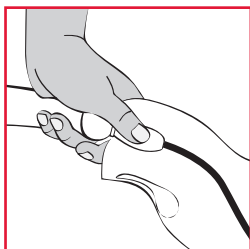


Knijp zonodig in het gelreservoir zodat de gel in de plasbuis gebracht wordt.
Houdt de inbrengtip op z'n plaats met duim en wijs- en middelvinger van de hand die ook de penis vasthoudt

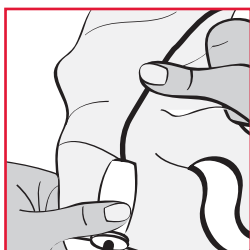

Pak de catheter met de vrije hand ongeveer 10cm onder het gel reservoir vast en voer hem in de plasbuis naar binnen. Houdt met duim en wijsvinger de catheter vast en trek de urinezak terug. Herhaal deze handeling totdat de urine gaat stromen.

Tijdens het inbrengen kan er wat weerstand optreden bij de prostaat. Voer een lichte constante druk uit op de catheter en strek de penis.

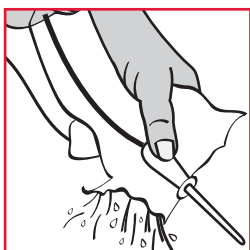

Verwijder de catheter langzaam uit de plasbuis. Ledig het opvangreservoir voordat U het weggooit. Trek aan de inkeping, aan de bovenzijde van het reservoir en voer de urine af.

Na gebruik kunt U de catheter in de vuilnisbak deponeren.
Nooit door het toilet spoelen!



Hollister
Postbus 2662
3800 GE Amersfoort
Telefoon: (033) 45 01 000
Fax: (033) 45 01 001