

## Gebruiksaanwijzing Anti-Reflux katheter

LET OP: Niet te gebruiken op een aangetaste of geïrriteerde huid.  
Niet gebruiken bij allergische reacties. Vervang de katheter wanneer deze beschadigd is.

### VOOR HET AANBRENGEN:

**1** Verwijder, indien nodig, schaamhaar voor het aanbrengen van de externe katheter. Was uw handen. Reinig de penis en met name de voorhuid. Zorg ervoor dat de penis goed droog is.



**2** Scheur de verpakking open langs de perforatielijn en haal de externe katheter eruit.



**3** Pak de katheter met duim en wijsvinger op de uitsparing van de aanbrenging vast en druk de katheter dicht.



**4** Plaats de katheter zodanig op de penis dat uw duim en wijsvinger de eikel raken. De aanbrenging mag niet over de penis schuiven.



**5** Het terugslagventiel zit nu halverwege de eikel.



**6** Rol de katheter vervolgens geheel over de penis uit. Let op dat de katheter niet wordt verschoven om zo huidplooiën te voorkomen.



**7** Verwijder de aanbrenging.



**8** Omsluit nu met uw hand de penis en knijp zachtjes, zodat de kleeflaag optimaal in contact wordt gebracht met de huid.



**9** De externe katheter kan nu op de urinecollector bevestigd worden.



### VOOR HET VERWIJDEREN:



1. Was uw handen.
2. Rol de katheter voorzichtig van de penis.
3. Reinig de penis en met name de voorhuid. Breng eventueel een nieuwe externe katheter aan.

#### Meer informatie:

Wilt u meer informatie over de Anti-Reflux katheter van Hollister? Bel dan gratis naar onze klantenservice: 0800 - 02 303 52. Of bezoek onze site: [www.hollister.nl](http://www.hollister.nl)