

Gebruiksaanwijzing InView met sombrero

LET OP: Niet te gebruiken op een aangetaste of geïrriteerde huid.
Niet gebruiken bij allergische reacties. Vervang de katheter wanneer deze beschadigd is.

VOOR HET AANBRENGEN:

1 Verwijder, indien nodig, schaamhaar voor het aanbrengen van de externe katheter. Was uw handen. Reinig de penis en met name de voorhuid. Zorg ervoor dat de penis goed droog is.




2 Scheur de verpakking open langs de perforatielijn en haal de externe katheter eruit.



3 Pak de katheter met duim en wijsvinger vast, zodanig dat uw vingers de opgerolde rand niet raken.



4 Haal de katheter van de sombrero door er een paar keer in te knijpen

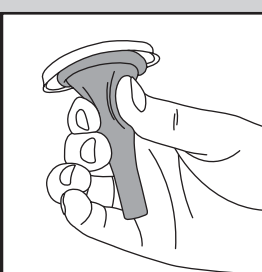

5 Plaats de katheter op de eikel. Zorg ervoor dat het anti-knikmechanisme de penis niet raakt.



6 Rol de katheter vervolgens geheel over de penis uit. Let op dat de katheter niet wordt verschoven om zo huidplooiën te voorkomen.



7 Omsluit nu met uw hand de penis en knijp zachtjes, zodat de kleeflaag optimaal in contact wordt gebracht met de huid.



8 De externe katheter kan nu op de urinecollector bevestigd worden.



VOOR HET VERWIJDEREN:



1. Was uw handen.
2. Rol de katheter voorzichtig van de penis.
3. Reinig de penis en met name de voorhuid. Breng eventueel een nieuwe externe katheter aan.

Meer informatie:

Wilt u meer informatie over de InView van Hollister? Bel dan gratis naar onze klantenservice: 0800 - 02 303 52. Of bezoek onze site: www.hollister.nl