

### Advance intermitterende catheters

Artikel	Lengte	Tip	Charrière	Kleur
92062	20 cm	nelaton	6	groen
92082	20 cm	nelaton	8	blauw
92102	20 cm	nelaton	10	zwart
92122	20 cm	nelaton	12	wit
92142	20 cm	nelaton	14	groen
92084	40 cm	nelaton	8	blauw
92104	40 cm	nelaton	10	zwart
92124	40 cm	nelaton	12	wit
92144	40 cm	nelaton	14	groen
92164	40 cm	nelaton	16	oranje
92184	40 cm	nelaton	18	rood
99124	40 cm	tiemann	12	wit
99144	40 cm	tiemann	14	groen
99164	40 cm	tiemann	16	oranje

### Advance Plus intermitterende catheters

94062	20 cm	nelaton	6	groen
94082	20 cm	nelaton	8	blauw
94102	20 cm	nelaton	10	zwart
94122	20 cm	nelaton	12	wit
94142	20 cm	nelaton	14	groen
94084	40 cm	nelaton	8	blauw
94104	40 cm	nelaton	10	zwart
94124	40 cm	nelaton	12	wit
94144	40 cm	nelaton	14	groen
94164	40 cm	nelaton	16	oranje
94184	40 cm	nelaton	18	rood

### Advance Hydro Soft intermitterende catheters

82103	15 cm	nelaton	10	zwart
82123	15 cm	nelaton	12	wit
82143	15 cm	nelaton	14	groen
82085	25 cm	nelaton	8	blauw
82105	25 cm	nelaton	10	zwart
82108	40 cm	nelaton	10	zwart
82128	40 cm	nelaton	12	wit
82148	40 cm	nelaton	14	groen
82168	40 cm	nelaton	16	oranje
82188	40 cm	nelaton	18	rood



Informatiebrochure intermitterende catheters

- Advance
- Advance Plus
- Advance Hydro Soft

## Wat is intermitterende catheterisatie?

Intermitterende catheterisatie is het regelmatig afvoeren van urine uit de blaas met behulp van een catheter die in de plasbuis wordt gebracht. De catheter is bedoeld voor éénmalig gebruik. Nadat u de catheterisatieprocedure zorgvuldig hebt uitgevoerd, is het zaak om de catheter op hygiënische wijze weg te gooien / op te ruimen.

## Waarom intermitterende catheterisatie?

De blaas is een soort opslagplaats voor afvalproducten van uw lichaam. Om uw lichaam gezond te houden is het noodzakelijk dat deze afvalproducten regelmatig worden afgevoerd. Daarbij is het van groot belang dat de blaas helemaal leeg wordt gemaakt om infecties te voorkomen en om te voorkomen dat de werking van de nieren wordt verstoord. Dat laatste kan gebeuren wanneer geïnfecteerde urine terugstroomt naar de nieren.

Naast het voorkomen van infecties en nierproblemen dient intermitterende zelfcatheterisatie ook nog een ander doel: het in stand houden en bevorderen van een gezonde blaaswerking.

## Het Alles-in-één-systeem van Advance catheters.

Het unieke gelreservoir maakt andere hulpmiddelen overbodig. Het zorgt ervoor dat de catheter glad genoeg is om gemakkelijk te worden ingebracht, zonder de catheter aan te raken en dat besmetting wordt voorkomen. Alles wat nodig is voor verantwoord catheteriseren, zit al in de verpakking.

## Veilig inbrengen zonder aanraken

Doordat de catheter wordt ingebracht zonder aanraken, wordt voorkomen dat bacteriën worden verspreid. Bovendien wordt de catheter vanuit de verpakking steriel in de plasbuis gebracht.

Voor vragen of deskundig advies kunt u ons gratis telefoonnummer bellen: 0800 – 52 303 52

## Assortimentsoverzicht Hollister intermitterende catheters

### Advance intermitterende catheter

- Beschermkap voor veiligheid en gemak
- Uniek gelreservoir, dus geen andere hulpmiddelen meer nodig
- Unieke beschermhuls, vermindert infectierisico
- Verkrijgbaar voor dames, heren en kinderen



### Advance Plus intermitterende catheter met urineopvangzak

- Geïntegreerde opvangzak, dus maximale vrijheid
- Geïntegreerd handvat, dus gemakkelijk te ledigen



### Advance Hydro Soft siliconen catheter

- Siliconen materiaal, dus extra zacht en comfortabel
- Water sachet toegevoegd, dus extra vrijheid
- Verkrijgbaar in 40 cm, 25 cm en 15 cm, voor heren, kinderen en dames

