


Material de Recolección

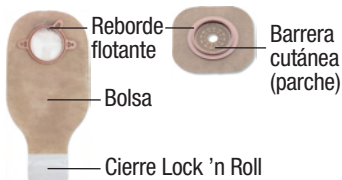

Bolsa, protector cutáneo (parche), bolsa de residuos, pañuelo de papel y/o tela para realizar la limpieza, y agua. Opcional: tijeras, lapicera, plantilla de medición, accesorios.

Prepare el Sistema de Bolsa



1 Mida el diámetro de su estoma utilizando una guía de medición o la plantilla provista por su enfermera (si utiliza una abertura de barrera con tamaño predefinido, consulte el punto 4).



2 Trace la forma sobre la barrera cutánea (parche). La barrera cutánea (parche) debe encajar perfectamente alrededor del estoma.



3 Con un par de tijeras curvas, recorte cuidadosamente una abertura en el protector cutáneo (parche) para que coincida con la forma. No corte por fuera de la línea sobre el papel antiadherente.

Retire el Sistema de Bolsa Usado



4 Retire el papel antiadherente del protector cutáneo (parche). Déjelo a un lado con el adhesivo hacia arriba.



5 Levante cuidadosamente una punta del adhesivo y despéguelo hacia abajo, desprendiendo delicadamente la piel del protector cutáneo (parche). Deseche adecuadamente la bolsa y el protector cutáneo usados. No los arroje por el excusado.

Limpie y Seque la Piel




6 Limpie la piel con agua o suavemente con jabón según las indicaciones de su médico. Enjuáguela y séquela completamente. No utilice aceites, polvos de talco, loción, o jabones perfumados sobre la piel.

Aplique el Nuevo Sistema de Bolsa



7 Centre la abertura del protector cutáneo (parche) alrededor del estoma, en forma de diamante. Presione suavemente el protector contra la piel. En el caso de utilizar protector con cinta adhesiva en los bordes, retire el papel protector de ambos lados y presione el adhesivo contra la piel.

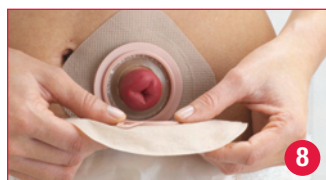


8 Una la bolsa al protector cutáneo trabando los bordes inferiores del reborde de la bolsa y el reborde del protector cutáneo. Presione ambos rebordes. Una serie de "clicks" confirmarán que lo está realizando correctamente. Cuando ya no escuche ningún "clicks", la bolsa se encontrará asegurada.



9 Presione la bolsa y el protector contra la piel. Presione durante un minuto (el calor y la presión ayudan a activar el adhesivo).



10 Cierre el extremo de la bolsa. En caso de utilizar una bolsa con drenaje, cierre el extremo de la bolsa con el cierre integrado **Lock 'n Roll** o coloque una pinza. Consulte el consejo de cuidado del cierre Lock 'n Roll para obtener más información sobre cómo utilizar este sistema de cierre.

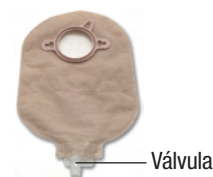

En caso de utilizar una bolsa para urostomía, asegúrese de que la válvula de drenaje se encuentre cerrada. El gotero de la válvula de drenaje debe quedar del lado de la bolsa que está en contacto con el cuerpo. Si lo desea, colóquela la tapa que fue incluida en la caja.

Consejos

- En caso de utilizar un anillo o pasta para protector, aplíquelo a la parte adhesiva del protector cutáneo (parche) junto a la abertura del estoma, siguiendo las instrucciones.
- La piel alrededor del estoma no debe tener ningún signo de erupción o herida. Consulte con un medico en caso de tener la piel irritada.
- Luego de la cirugía, el estoma puede presentar hinchazón. Puede demorar hasta un periodo de seis semanas que el estoma termine de encogerse.
- Al limpiarlo, el estoma puede sangrar levemente.
- No se recomienda el uso de Toallitas para Piel con Gel (N.º Stock 7917) u otras marcas de preparados para la piel con barreras cutáneas de uso prolongado como la barrera **Flextend** ya que pueden disminuir el tiempo de uso.

Lista de productos

	N.º Stock
Sistema de Bolsa de 2 Piezas New Image	
Barrera cutánea (parche)	_____
Bolsa	_____
<i>Accesorios</i>	
Anillos para Barrera Adapt	_____
Cinturón para Ostomía Adapt	_____
Pasta Adapt	_____
Desodorante Lubricante Adapt	_____
Polvo para Estoma Adapt	_____
Otros _____	_____

Para obtener más información, consulte las instrucciones adjuntas al producto.

Instrucciones Adicionales

Para solicitar una muestra, si tiene consultas sobre el producto o preguntas clínicas específicas sobre los mismos, llame al **1.888.740.8999**



Hollister Incorporated
Libertyville, IL USA

Distribuido por
Hollister Limited
Aurora, Canadá
1.800.263.7400
www.hollister.com