

Advance Plus

Sistema de sonda intermitente Sin Tocar



Guía de uso



La sonda intermitente Hollister Advance Plus presenta la técnica Sin Tocar que permite a los usuarios sondarse con confianza; prácticamente en cualquier momento y en cualquier lugar.



Primero las personas: Denise Miller, Escocia

“La diferencia es como el día y la noche”, dice Denise. Su nuevo producto le ha abierto la puerta a la alegría de redescubrir que puede disfrutar del maravilloso mundo exterior.







Advance Plus

Sistema de sonda intermitente Sin Tocar

Cómo funciona el sistema urinario

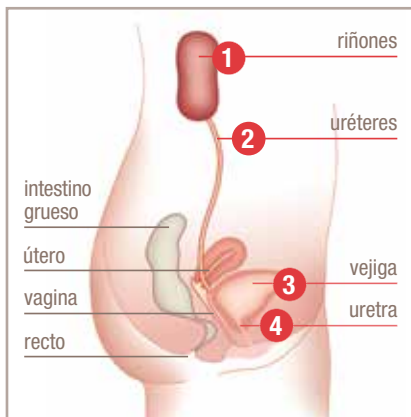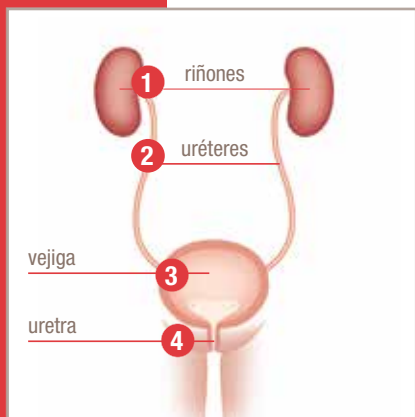

- 1 La orina es producida por los riñones, los cuales filtran los productos de desecho fuera de su organismo.
- 2 Los desechos líquidos pasan por tubos llamados uréteres hasta la vejiga, órgano que almacena la orina.
- 3 Cuando la vejiga se llena, se envía una señal al cerebro para indicarle al músculo del esfínter de la uretra que se relaje y a la vejiga que se contraiga.
- 4 La orina fluye por la uretra, tubo natural por el que sale la orina desde la vejiga y fuera del cuerpo.

Autosondaje uretral intermitente (AUI)

Cuando la vejiga no se vacía sola, podría recomendarse el AUI. El autosondaje se debe realizar bajo asesoramiento médico y únicamente de acuerdo con las instrucciones que se proporcionan. Implica utilizar una sonda para drenar la orina de su vejiga por la uretra. La orina debe expulsarse regularmente a lo largo del día para mantener el cuerpo saludable.



1 Lávese las manos con un jabón neutro y agua.



2 Abra el envase separando la parte transparente.



5 Coloque la sonda sobre el envase abierto para posicionar la punta sobre el papel, con cuidado de no contaminar la punta de la sonda.



6 Separe los labios de la vagina y limpie el meato urinario con un jabón neutro sin perfume o con una toallita húmeda sin alcohol. Si utiliza el Advance Plus Kit, utilice los hisopos BZK que se proporcionan para limpiar.



9 Para vaciar antes de desechar el producto, rasgue la bolsa de recolección por la marca para drenar la orina en un inodoro u otro dispositivo de recolección.



10 Puede desechar la sonda en una papelerera. NO LA TIRE EN EL INODORO. Lávese las manos con un jabón neutro y agua.

Confianza. Pura y Simple.



3 Quite la tapa roja de la punta protectora de la sonda.



4 Sostenga el reservorio de gel (sin apretar) en una mano y con la otra mueva la sonda hacia adelante hasta que la punta de la sonda llene la punta protectora. Asegúrese de que la sonda no se salga de la punta.



7 Mantenga los labios separados con dos dedos. Sostenga suavemente el reservorio de gel, introduciendo la punta protectora hasta que la base entre en contacto con la entrada de la uretra. Mantenga la punta protectora en su lugar. Suelte los labios.



8 Se deberá apretar suavemente el reservorio de gel hasta que la sonda haya pasado a través de la uretra y llegue a la vejiga. A medida que avanza la sonda y la bolsa empieza a plegarse, para retirar la bolsa hacia atrás, sujete la sonda de manera firme a través del reservorio de gel. Esta acción ayudará a evitar que la sonda se resbale y se salga de la uretra antes de retirar suavemente la bolsa hacia atrás. Continúe deslizando la sonda hasta que la orina comience a fluir. Cuando la orina haya dejado de salir, retire la sonda lentamente.

Notas



Puede estar seguro de que esta sonda intermitente, que ha recomendado su médico, tiene las características necesarias para ayudarle a sondarse con confianza.

- 1 Punta protectora Sin Tocar (Touch Free)**
ayuda a que la sonda evite las bacterias medioambientales
- 2 Reservorio de gel regulado por el usuario**
permite al usuario regular la lubricación de la sonda
- 3 Bolsa de recolección integrada con asa grande**
permite sondarse sin tocar



ADVERTENCIA: Para ayudar a reducir el riesgo de infecciones y/u otras complicaciones, no reutilice el producto.

ADVERTENCIA: En caso de sentir malestar o cualquier signo de lesión, interrumpir inmediatamente el uso del producto y consultar a su profesional de la salud.

- Sistema cerrado para sondaje intermitente, de un solo uso, prelubricado, listo para usar
- Sin látex
- Punta protectora y bolsa recolectora para la técnica de inserción sin tocar.
- Reservorio de gel único
- 2 orificios de drenaje de sonda ultra suaves
- Vía de drenaje con código de color
- Bolsa de recolección de 1500 ml

Esta sonda intermitente es un dispositivo tubular flexible que se inserta por la uretra y se utiliza en los pacientes masculinos, femeninos y pediátricos que necesiten eliminar la orina de la vejiga.

PRECAUCIÓN:

Si presenta cualquiera de las situaciones descritas a continuación, por favor consulte a su profesional de la salud antes de utilizar este producto:

- Uretra seccionada
- Sangrado uretral de origen desconocido
- Estrechamiento uretral pronunciado
- Falsa vía uretral
- Uretritis – inflamación de la uretra
- Prostatitis – inflamación de la próstata
- Epididimitis – inflamación del epidídimo (vaso seminífero)

PRECAUCIÓN:

La técnica del autocateterismo debe realizarse siguiendo las pautas y las recomendaciones de su profesional de la salud y sólo de acuerdo a las instrucciones de uso indicadas. Dado que el número de cateterizaciones varía en función de la persona, debería ser su médico quien determinara su frecuencia. Para cualquier otra pregunta sobre su cateterización, por favor, contacte con su médico.

NOTA: Almacenar las cajas en posición horizontal y a temperatura ambiente normal.

Rx Only. La ley federal (de EEUU) limita la venta de este dispositivo a médicos o bajo prescripción médica y a otros profesionales de la salud autorizados por la ley del estado a pedir este producto.

Para preguntas
clínicas específicas
sobre nuestros
productos:
1.888.740.8999
Únicamente por
pedidos:
1.800.323.4060



Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, Illinois 60048 USA
1.800.323.4060

Distributed in Canada by
Hollister Limited
95 Mary Street
Aurora, Ontario L4G 1G3
1.800.263.7400

www.hollister.com