


**VaPro Plus Pocket** Sonda hidrofílica intermitente con sistema No Tocar

Número de Stock	Largo (pulgadas)	Tamaño	Cantidad por caja
71084-30	16	8Fr	30
71104-30	16	10Fr	30
71124-30	16	12Fr	30
71144-30	16	14Fr	30
71164-30	16	16Fr	30

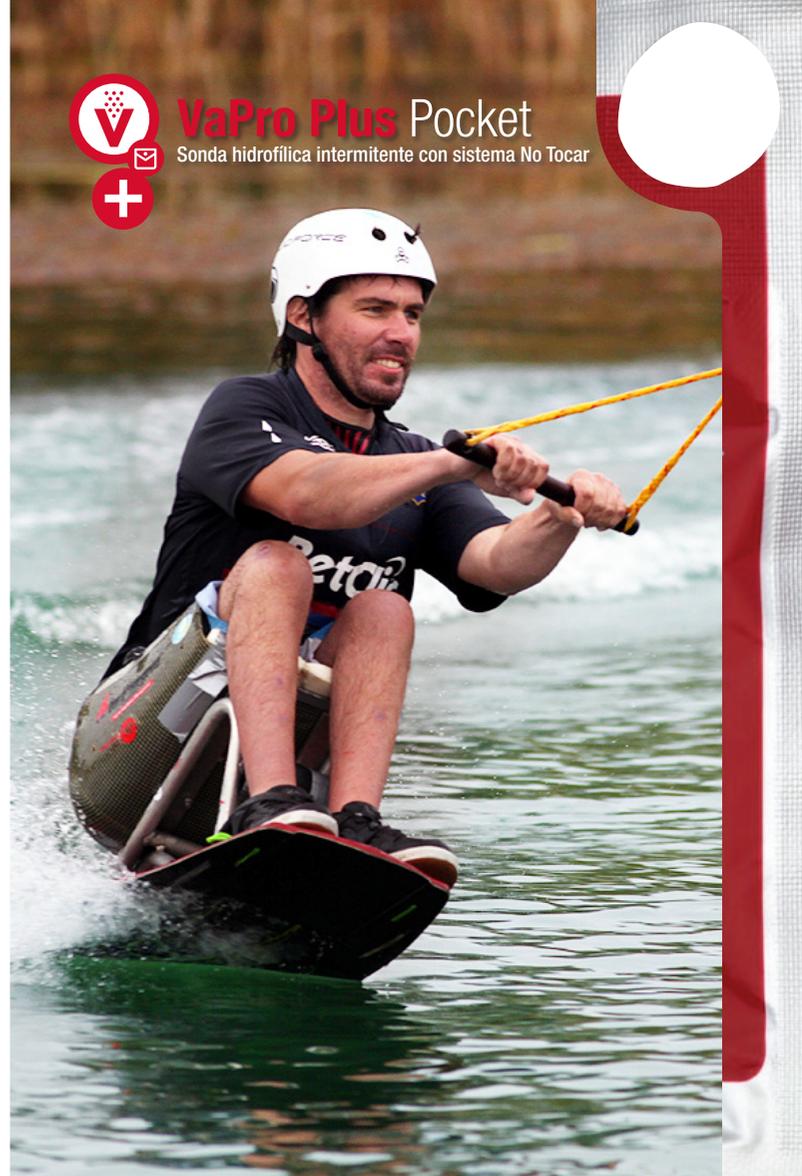

Para obtener más información o para solicitar una muestra del producto, visite [hollisterpeoplefirst.com/vapro](http://hollisterpeoplefirst.com/vapro)



- Sonda intermitente de un solo uso, lista para usar
- Sonda de PVC con recubrimiento hidrofílico
- Punta protectora y funda para la técnica de inserción no-tocar
- 2 orificios de drenaje suaves
- Vía de drenaje con código de color

Esta sonda intermitente es un dispositivo tubular flexible que se inserta por la uretra y se utiliza en los pacientes masculinos, femeninos y pediátricos que necesiten eliminar la orina de la vejiga.

**ADVERTENCIA:** Para ayudar a reducir el riesgo de infecciones y/u otras complicaciones, no reutilice el producto. En caso de sentir malestar o cualquier signo de lesión, interrumpir inmediatamente el uso del producto y consultar a su profesional de la salud.

**PRECAUCIÓN:** Si presenta cualquiera de las situaciones descritas a continuación, por favor consulte a su profesional de la salud antes de utilizar este producto: Uretra seccionada, sangrado uretral de origen desconocido, estrechamiento uretral pronunciado, falsa vía uretral, uretritis – inflamación de la uretra, prostatitis – inflamación de la próstata, epididimitis – inflamación del epidídimo (tubo testicular). La técnica del autocateterismo debe realizarse siguiendo las pautas y las recomendaciones de su profesional de la salud y sólo de acuerdo a las instrucciones de uso indicadas. Dado que el número de cateterizaciones varía en función de la persona, debería ser su médico quien determinara su frecuencia. Para cualquier otra pregunta sobre su cateterización, por favor, contacte a su médico.

**AVISO: Rx Only.** La ley federal (de EEUU) limita la venta de este dispositivo a médicos o bajo prescripción médica y a otros profesionales de la salud autorizados por la ley del estado a pedir este producto. Previo al uso de este dispositivo, asegúrese de leer (i) la información completa sobre cómo usar este dispositivo, incluidas las advertencias, precauciones e instrucciones de uso, y (ii) todos los demás prospectos y etiquetas del envase suministradas con el producto y sus accesorios.



**Hollister**

Hollister y el logotipo, y VaPro Plus Pocket son marcas registradas de Hollister Incorporated.  
©2015 Hollister Incorporated.  
922935-1215





## VaPro Plus Pocket

Sonda hidrofílica intermitente con sistema No Tocar

### No debe comprometer protección para obtener discreción.

Sonda con sistema "No tocar" con bolsa de recolección integrada en un envase de tamaño de bolsillo.

#### La sonda hidrofílica intermitente VaPro Plus Pocket con sistema "No tocar" combina en perfecto equilibrio las siguientes características:

##### Facilidad de uso

Viene prehidratada y lista para usarse

##### Protección

La punta y la funda de protección ayudan a mantener alejados los gérmenes

##### Conveniente

Tanto la sonda como la bolsa de recolección vienen en una bolsa pequeña y discreta que es fácil de abrir



#### ¿Para qué sirve la punta de protección?

En muchas personas, las bacterias se encuentran concentradas en la primera sección de la uretra. La punta de protección está diseñada para ayudar a reducir el riesgo de transportar estas bacterias a la vejiga durante la inserción de la sonda. Introducir la punta de protección en la uretra y, luego, pasar la sonda por el extremo de la punta de protección puede ayudar que la sonda evite estas bacterias.