

Onli

Sonda Hidrofílica
lista para usar

Sin importar si su día es normal o extraordinario, la sonda Onli hará que sea mucho mejor

Está diseñado para no interrumpir su rutina diaria, ya que no presenta molestias ni complicaciones

Preparado. Simple.



 Hollister.

Continence Care
People First




Preparado

Prehidratada y lista para usar tan pronto como se saca del empaquetado

Mejor control

El mecanismo guía ergonómico en la sonda de 16 pulgadas ayuda a no tocar la sonda

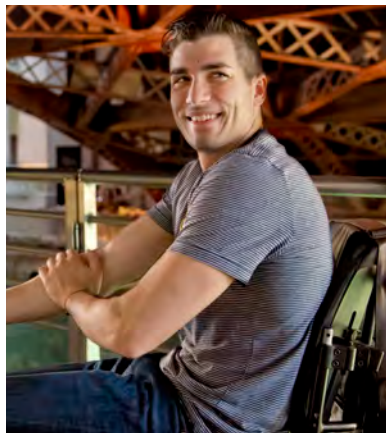

Alivio con el que puede contar, sin importar lo que le depare su día

La sonda Onli está diseñada para un uso sencillo y diario

La sonda intermitente con recubrimiento hidrofílico Onli está diseñada para brindarle una experiencia sin molestias ni complicaciones.

Onli

Sonda Hidrofílica lista para usar



- Ábrala con confianza
- Lista para usar con derrames reducidos¹ y sin dejar manchas^{*2}
- Recubrimiento hidrófilo suave para introducir y retirar la sonda sin inconvenientes

* sobre tela para jeans, lino y poliéster



Simple

Sonda lista para usar en empaquetado de papel de aluminio fácil de abrir

Inserción suave y sencilla

El diseño de la sonda brinda un equilibrio entre flexibilidad y rigidez para que se pueda insertar fácilmente sin tocar la sonda





Onli

Sonda Hidrofílica
lista para usar

Fácil de usar
desde el principio

Onli

Sonda Hidrofílica
lista para usar



Tamaño	16 in	7 in	Cant. por caja
8 Fr	82084-30	82081-30	30
10 Fr	82104-30	82101-30	30
12 Fr	82124-30	82121-30	30
14 Fr	82144-30	82141-30	30
16 Fr	82164-30		30

Llame hoy para recibir más información o
para pedir una muestra: 888.740.8999 o visite
hollister.com/onli

Esta sonda intermitente es un dispositivo tubular flexible que se inserta por la uretra y se utiliza en los pacientes masculinos, femeninos y pediátricos que necesiten eliminar la orina de la vejiga

- Sonda intermitente de un solo uso, lista para usar
- Sonda con recubrimiento hidrofílico sin ftalato
- 2 orificios de drenaje suaves
- Vía de drenaje con código de color
- No contiene látex de caucho natural
- Mecanismo guía en la sonda de 16 in para una mejor inserción

ADVERTENCIA: Para ayudar a reducir el riesgo de infecciones y/u otras complicaciones, no reutilice el producto.

ADVERTENCIA: En caso de sentir malestar o cualquier signo de lesión, interrumpir inmediatamente el uso del producto y consultar a su profesional de la salud.

PRECAUCIÓN: Si presenta cualquiera de las situaciones descritas a continuación, por favor consulte a su profesional de la salud antes de utilizar este producto:

- Uretra seccionada
- Sangrado uretral de origen desconocido
- Estrechamiento uretral pronunciado
- Falsa vía uretral
- Uretritis – inflamación de la uretra
- Prostatitis – inflamación de la próstata
- Epididimitis – inflamación del epidídimo (tubo testicular)

PRECAUCIÓN: La técnica del autocateterismo debe realizarse siguiendo las pautas y las recomendaciones de su profesional de la salud y sólo de acuerdo a las instrucciones de uso indicadas. Dado que el número de cateterizaciones varía en función de la persona, debería ser su médico quien determinara su frecuencia. Para cualquier otra pregunta sobre su cateterización, por favor, contacte con su médico.

AVISO: Rx Only. La ley federal (de EEUU) limita la venta de este dispositivo a médicos o bajo prescripción médica y a otros profesionales de la salud autorizados por la ley del estado a pedir este producto. Previo al uso de este dispositivo, asegúrese de leer (i) la información completa sobre cómo usar este dispositivo, incluidas las advertencias, precauciones e instrucciones de uso, y (ii) todos los demás prospectos y etiquetas del envase suministradas con el producto y sus accesorios.

NOTA: Almacenar las cajas en posición horizontal y a temperatura ambiente.

Este producto consta de: mecanismo guía de termoplástico (solamente para la sonda de 16 inch), vía de drenaje de polivinilcloruro y tubo sin ftalatos.

1. Datos en archivo. Estudio sobre derrame de agua en embalajes de sondas Onli y productos de la competencia. Hollister, 2015.
2. Datos en archivo. Análisis de derrame de líquido potencial que puede manchar la ropa en sondas Onli y productos de la competencia. Hollister, 2015.



El logotipo de Hollister y Onli son marcas
registradas de Hollister Incorporated.
© 2017 Hollister Incorporated. 923092-117