


VaPro Plus Pocket

Sonda hidrofílica intermitente con sistema No tocar

Mismo envase de la sonda VaPro Plus en una bolsa pequeña y discreta

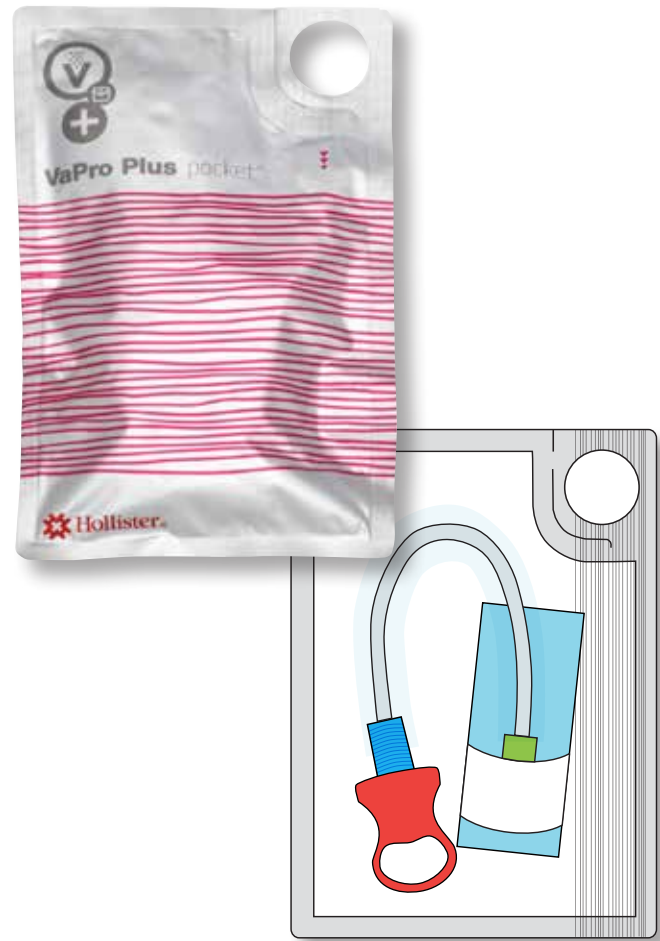

- Sonda intermitente de un solo uso, lista para usar
- Sonda de PVC con recubrimiento hidrofílico
- Punta protectora y funda para la técnica de inserción no-tocar
- 2 orificios de drenaje suaves
- Via de drenaje con código de color

Esta sonda intermitente es un dispositivo tubular flexible que se inserta por la uretra y se utiliza en los pacientes masculinos, femeninos y pediátricos que necesitan eliminar la orina de la vejiga.

ADVERTENCIA: Para ayudar a reducir el riesgo de infecciones y/u otras complicaciones, no reutilice el producto. En caso de sentir malestar o cualquier signo de lesión, interrumpir inmediatamente el uso del producto y consultar a su profesional de la salud.

PRECAUCIÓN: Si presenta cualquiera de las situaciones descritas a continuación, por favor consulte a su profesional de la salud antes de utilizar este producto: Uretra seccionada, sangrado uretral de origen desconocido, estrechamiento uretral pronunciado, uretritis – inflamación de la uretra. La técnica del autocateterismo debe realizarse siguiendo las pautas y las recomendaciones de su profesional de la salud y sólo de acuerdo a las instrucciones de uso indicadas. Dado que el número de cateterizaciones varía en función de la persona, debería ser su médico quien determinara su frecuencia. Para cualquier otra pregunta sobre su cateterización, por favor, contacte a su médico.

AVISO: Rx Only. La ley federal (de EEUU) limita la venta de este dispositivo a médicos o bajo prescripción medica y a otros profesionales de la salud autorizados por la ley del estado a pedir este producto. Previo al uso de este dispositivo, asegúrese de leer (i) la información completa sobre cómo usar este dispositivo, incluidas las advertencias, precauciones e instrucciones de uso, y (ii) todos los demás prospectos y etiquetas del envase suministradas con el producto y sus accesorios.

Notas

Hollister y el logotipo, VaPro, VaPro Plus, y VaPro Plus Pocket son marcas registradas de Hollister Incorporated.
 ©2015 Hollister Incorporated.
 922683-1215

Para preguntas
 clínicas específicas
 sobre nuestros
 productos:
 1.888.740.8999

Únicamente por
 pedidos:
 1.800.323.4060



Hollister Incorporated
 Libertyville, IL USA

www.hollister.com

Guía de uso



La sonda hidrofílica intermitente VaPro ayuda a proporcionar el equilibrio adecuado de facilidad de uso y protección.



Sonda hidrofílica intermitente con sistema No Tocar



Tecnología de Hollister

VaPro Plus

Sonda hidrofílica intermitente con sistema No Tocar

Prehidratada y lista para usar

la sonda viene completamente lubricada, suave y lista para usar

1 Funda de protección

facilita el manejo y ayuda a mantener las bacterias alejadas de la sonda

2 Punta protectora

ayuda a reducir el riesgo de introducción de bacterias en el interior del sistema urinario

3 Bolsa de recolección integrada

no se necesita un receptáculo

La sonda se encuentra ubicada fuera de la bolsa de recolección, para un manejo práctico

Continence Care
 People First






VaPro Plus

Sonda hidrofílica intermitente con sistema No Tocar

Cómo funciona el sistema urinario

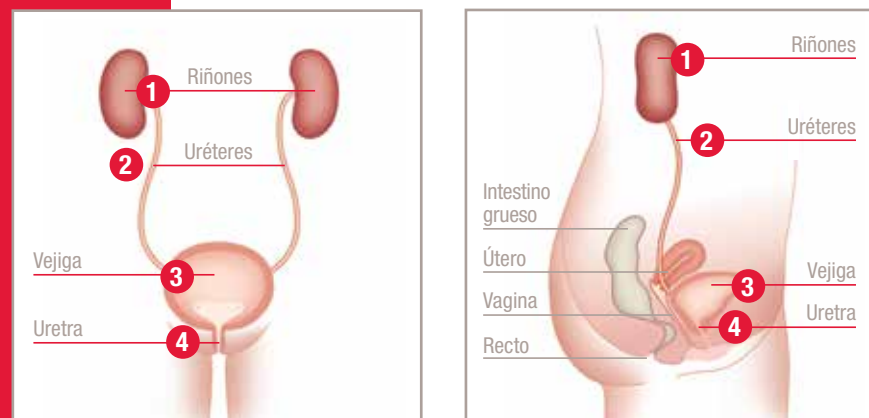

- 1 La orina es producida por los riñones, los cuales filtran los productos de desecho fuera de su organismo.
- 2 Los desechos líquidos pasan por tubos llamados uréteres hasta la vejiga, órgano que almacena la orina.
- 3 Cuando la vejiga se llena, se envía una señal al cerebro para indicarle al músculo del esfínter de la uretra que se relaje y a la vejiga que se contraiga.
- 4 La orina fluye por la uretra, tubo natural por el que sale la orina desde la vejiga y fuera del cuerpo.

Autosondaje Uretral intermitente (AUI)

Cuando la vejiga no se vacía sola, podría recomendarse el AUI. El autosondaje se debe realizar bajo asesoramiento médico y únicamente de acuerdo con las instrucciones que se proporcionan. Implica utilizar una sonda para drenar la orina de su vejiga por la uretra. La orina debe expulsarse regularmente a lo largo del día para mantener el cuerpo saludable.



1 Lávese las manos con un jabón neutro y agua.



2 Para abrir el envase de la sonda, tire hacia usted del orificio para introducir el dedo, en la parte superior, al menos hasta mitad del camino hacia la parte inferior del envase.



3 Saque la sonda del envase.



4 Para quitar la bolsa colectora, tire la banda de papel hacia la sonda y en dirección contraria a la bolsa para retirarla, o bien coloque la sonda en una superficie plana y, con la parte inferior del puño, despegue la bolsa de la sonda para liberar la banda de papel.



5 Separe los labios de la vagina y limpie el meato urinario con un jabón neutro sin perfume, o con una toallita húmeda sin alcohol.



6 Retire el tapón rojo de la punta protectora de la sonda.



7 Sujete la sonda con una mano, y con la otra hágala avanzar hasta que la punta de la sonda alcance la punta protectora, teniendo la precaución de que la sonda no sobresalga.



8 Separe los labios de la vagina con los dedos. Coja la sonda por debajo de la base de la punta protectora, e inserte la punta protectora hasta que la base esté en contacto con el meato urinario. Libere los labios, **manteniendo la punta protectora en esa posición.** Introduzca la sonda empujándola hacia delante hasta que la orina empiece a fluir. Una vez que la orina deje de fluir, retire suavemente la sonda para asegurarse de que haya vaciado completamente la vejiga. Saque la sonda suavemente hasta su completa retirada.



9 Para vaciar la bolsa colectora antes de desecharla, rásguela a la altura de la flecha (con la inscripción "Tear here to empty") para drenar la orina.



10 Puede desechar la sonda en una papelerera. No la tire en el inodoro.



11 Lávese las manos con un jabón neutro y agua.

Notas
