



# Zweiteiliges Versorgungssystem

## Verbrauchsmaterial bereitlegen

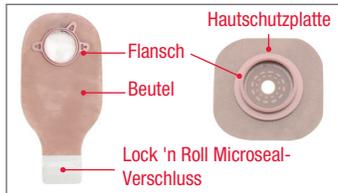

Legen Sie Beutel, Hautschutzplatte, Entsorgungsbeutel, Taschentuch und/oder Tuch zur Reinigung und Wasser bereit. Optional: Schere, Stift, Messhilfe und/oder Zubehör.

## Bereiten Sie die Hautschutzplatte und den Beutel vor

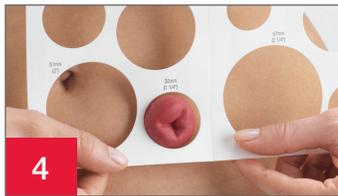

Messen Sie das Stoma vor jeder Anwendung des Hautschutzes mit einer Stomamesshilfe aus (wenn Sie eine vorgefertigte Hautschutzöffnung verwenden, gehen Sie zu Schritt 7).

## Bei Bedarf Paste oder Ringe hinzufügen



Bringen Sie gegebenenfalls einen Hautschutzring oder einen dünnen Wulst aus Paste um die Öffnung herum an und befolgen Sie dabei die Gebrauchsanweisung.



12

## Benutztes Versorgungssystem entfernen



1

Heben Sie vorsichtig eine Kante des Klebers an und ziehen Sie sie nach unten ab. Schieben Sie die Haut vorsichtig von der Hautschutzplatte weg. Entsorgen Sie den gebrauchten Beutel und die Hautschutzplatte ordnungsgemäß. Nicht in der Toilette herunterspülen.



5

Übertragen Sie die Maße des Stomas auf die Folie des Hautschutzes. Die Hautschutzplatte sollte dort sitzen, wo Haut und Stoma aufeinandertreffen. Stellen Sie sicher, dass keine Haut zwischen der Hautschutzplatte und dem Stoma zu sehen ist, um Leckagen und Hautreizungen zu vermeiden.

## Das neue Versorgungssystem anwenden



9

Platzieren Sie die Öffnung der Hautschutzplatte über dem Stoma und bringen Sie die Platte in einer Rautenform an.

Bei mit Klebeband umrandeten Hautschutz entfernen Sie das Trägerpapier auf beiden Seiten und drücken Sie den Klebefläche auf die Haut.

Schließen Sie den Boden des Beutels. Wenn Sie einen Ausstreifbeutel verwenden, schließen Sie den **Lock 'n Roll**-Verschluss am Boden des Beutels oder bringen Sie eine Beutelklemme an. Weitere Informationen zur Verwendung dieses Verschlusssystems finden Sie im *Pflegehinweise für den Lock 'n Roll Microseal-Verschluss*.

## Haut reinigen und trocknen



2

Reinigen Sie die Haut mit Wasser oder einer milden Seife, wie von Ihrem Arzt empfohlen. Gründlich abspülen und trocknen. Verwenden Sie keine Öle, Puder, Lotionen oder lotionsartige Seifen auf der Haut.



6

Schneiden Sie mit einer kleinen gebogenen Schere vorsichtig eine Öffnung in die Hautschutzplatte, die dem Muster entspricht. Schneiden Sie nicht über die Linie auf der Trennfolie hinaus.

## Zustand der Haut prüfen



3

Vergewissern Sie sich, dass die Haut um Ihr Stoma (peristomal) intakt ist und keine Reizungen, Ausschläge oder Rötungen aufweist.\*

\* Kontaktieren Sie Ihre WOC/NSWOC-Pflegekraft, wenn Sie Reizung, Ausschlag oder Rötung bemerken



7

Entfernen Sie die Schutzfolie von der Hautschutzplatte.



10

Drücken Sie etwa eine Minute lang sanft auf den Hautschutz, um eine optimale Haftung zu erreichen.



11

Befestigen Sie den Beutel an der Hautschutzplatte, indem Sie die unteren Kanten des Flansches des Beutels und des Flansches der Hautschutzplatte zusammenführen.

Drücken Sie die beiden Flansche zusammen. Eine Reihe von „Klicks“ bestätigt, dass Sie es richtig machen. Kein „Klicken“ mehr bedeutet, dass der Beutel gesichert ist.

Wenn Sie einen Urostomiebeutel verwenden, stellen Sie sicher, dass das Abstreifventil geschlossen ist. Die Träne auf dem Abstreifventil sollte zur Körperseite des Beutels zeigen.

Falls gewünscht, bringen Sie die mitgelieferte Kappe an.



Ausgießer

## Zweiteiliges Versorgungssystem

TIPPS	LISTE DER PRODUKTE	LAGERBESTAND-NR.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Haut um Ihr Stoma sollte keine Anzeichen von Ausschlag oder Wunden aufweisen</li> <li>• Gereizte Haut sollte von einem Arzt untersucht werden</li> <li>• Wenn Sie einen Hautschutzring oder eine Hautschutzpaste verwenden, tragen Sie diese wie vorgeschrieben auf die haftende Seite der Hautschutzplatte neben der Stomaöffnung auf</li> <li>• Ihr Stoma wird nach der Operation wahrscheinlich geschwollen sein. Es kann mehrere Wochen oder Monate dauern, bis das Stoma auf seine endgültige Größe geschrumpft ist</li> <li>• Das Stoma kann leicht bluten, wenn Sie es reinigen</li> <li>• Die Verwendung von Hautschutztüchern wird unter Hautschutzplatten, die über einen längeren Zeitraum getragen werden, nicht empfohlen, da sie die Tragedauer verkürzen können.</li> </ul>	<p><b>Zweiteiliges Versorgungssystem</b></p> <p>Hautschutzplatte _____</p> <p>Beutel _____</p> <p><b>Zubehör</b></p> <p>Hautschutzringe _____</p> <p>Stoma-Gürtel _____</p> <p>Paste _____</p> <p>Geruchsneutralisierendes Gleitmittel _____</p> <p>Hautschuttpuder _____</p> <p>Sonstige _____</p>	

### Zusätzliche Anweisungen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Wenn Sie Fragen zu Produkten, Probenahmen oder detaillierte klinische Fragen zu unseren Produkten in den USA haben, rufen Sie uns unter **1.888.808.7456** an. In Kanada rufen Sie **1.800.263.7400** an.

[www.hollister.com](http://www.hollister.com)

Die Haut muss vor dem Anlegen der Hautschutzplatte sauber und trocken sein.

Lesen Sie vor der Anwendung unbedingt die Gebrauchsanweisung, um sich über den Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen zu informieren.

Das Hollister-Logo, Lock 'n Roll und „Gesunde Haut. Gute Aussichten.“ sind Marken von Hollister Incorporated. © 2018 Hollister Incorporated. 923081-1118 US-00666