


Anillos de barrera Adapt

Información general

- Utilícelos para rellenar o sellar contornos irregulares de la piel alrededor del estoma para crear una superficie plana.
- Utilícelos para ayudar a prevenir que el drenaje de la ostomía se fugue debajo del sello de la bolsa.
- Se pueden cortar, estirar o apilar para mejorar el ajuste de su sistema de bolsa.
- Para su comodidad, hay opciones disponibles de 2" (espesor de 2,3 mm o 4,5 mm) o de 4" (espesor de 2,3 mm) de diámetro exterior.

Uso de los anillos de barrera Adapt

1. Lave y seque su piel completamente.
2. Retire el anillo de barrera de la bandeja de plástico (Figura 1) y luego retire las láminas de protección de ambos lados del anillo de barrera (Figura 2).
3. Estire y dé forma al anillo antes de colocarlo (Figura 3). Puede elegir:
 - a. colocar el anillo de barrera en la cara adhesiva de la barrera cutánea (Figura 4), o
 - b. colocar el anillo de barrera en su piel y luego colocar su sistema de bolsa (Figura 5).
4. Apile varios anillos de barrera si es necesario, para lograr un mejor ajuste (Figura 6).
5. Para retirarlo, despéguelo delicadamente de la piel cuando cambie su sistema de bolsa.

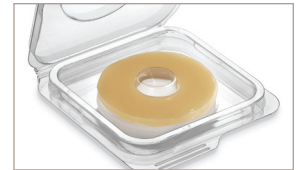


1 Retire de la bandeja de plástico.



2 Retire ambos papeles antiadherentes.



3 Estire para lograr un mejor ajuste.

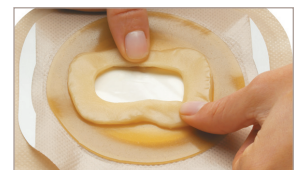

4 Dé forma para lograr un ajuste personalizado.



5 Coloque el anillo en la piel, asegurándose de que se ajusta donde se unen la piel y el estoma.



6 Apilar para lograr un mejor ajuste.

Preguntas frecuentes

¿Cómo sé cuál anillo de barrera (de 2" o 4") debo utilizar?

La mayoría de las personas considera que el anillo de 2" funciona mejor para estirar o dar forma y obtener así un ajuste personalizado alrededor del estoma. El anillo de 4" se puede utilizar como una barrera cutánea de ostomía completa o desarmado en varias piezas para lograr un sellado alrededor del estoma.

¿Por qué elegiría utilizar un anillo delgado de 2" (2,3 mm de espesor)?

El anillo de barrera delgado está diseñado para estirarse y cambiar su forma como la versión estándar, pero ofrece un perfil bajo.

¿El anillo de barrera tiene una parte superior o inferior que debe colocarse?

No, cualquiera de las partes se puede colocar sobre la piel.

Mi estoma no es redondo. ¿Aun así puedo utilizar los anillos de barrera?

Sí, los anillos de barrera Adapt se pueden estirar y moldear con facilidad para obtener un ajuste personalizado.

Solía utilizar la pasta. ¿Los anillos de barrera son mejores que la pasta?

Utilizar los anillos de barrera Adapt en lugar de la pasta tiene muchas ventajas. Para algunas personas, los anillos de barrera son más fáciles de colocar y retirar que la pasta. Los anillos de barrera son más duraderos y tienden a ser más resistentes a la erosión de su descarga de ostomía. La mayoría de las personas descubren que los anillos de barrera eliminan la necesidad de la pasta.

¿Puedo utilizarlos si mi piel está irritada?

Sí*, los anillos de barrera Adapt no tienen alcohol, así que no se siente ardor cuando se colocan en la piel irritada o lesionada.

¿Los anillos de barrera Adapt son reembolsados por el seguro?

En los EE. UU., generalmente Medicare y la mayoría de las compañías de seguros privadas cubren los anillos de barrera Adapt como anillos de uso prolongado**. El código HCPCS es A4385.

* Un profesional de la salud cualificado deberá evaluar la piel irritada alrededor del estoma y ayudará a determinar la causa del problema de la piel y cómo prevenir una lesión mayor.

