


## Sistema de bolsa para prematuro Pouchkins

### Materiales

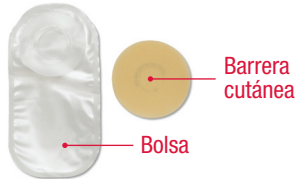

Bolsa colectora, barrera cutánea, guía medidora, tijeras, bolígrafo, agua y gasa, bolas de algodón o papel tisú.

### Preparación de la barrera cutánea y la bolsa



1 Mida el diámetro del estoma con una guía de medición de estoma antes de cada aplicación de barrera.




2 Trace el tamaño de la abertura determinada en la barrera cutánea. La barrera cutánea debe encajar en el punto de contacto entre la piel y el estoma. Compruebe que no se vea la piel entre la barrera cutánea y el estoma para evitar fugas e irritación de la piel.



3 Con tijeras curvas pequeñas, recorte cuidadosamente una abertura en la barrera cutánea que coincida con el patrón. No corte por fuera de la línea sobre el protector antiadherente.



4 Retire el protector antiadherente de la barrera cutánea.

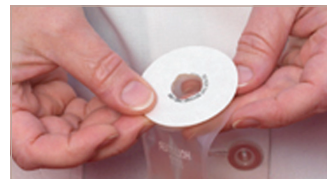

5 Con el lado de papel de la barrera cutánea hacia arriba, centre la barrera cutánea en el adhesivo de la bolsa. Mantenga la posición durante 10 segundos. No debe quedar visible ningún adhesivo fuera de la barrera cutánea.



6 Retire el protector antiadherente de la barrera cutánea. Déjela a un lado con el adhesivo hacia arriba.



7 Levante cuidadosamente un borde del adhesivo y despéguelo hacia abajo, desprendiendo la piel de la barrera cutánea delicadamente. Deseche adecuadamente la bolsa usada. No la arroje por el excusado.

### Limpie y seque la piel



8 Limpie la piel con agua o jabón suave según las indicaciones del profesional de la salud. Enjuáguela y séquela completamente. No aplique aceites, polvos, lociones ni jabones tipo loción sobre la piel.



9 Centre la abertura de la barrera cutánea alrededor del estoma. Aplique una presión leve a la barrera cutánea alrededor de un minuto para lograr una mejor adherencia.

### Consejos

- La bolsa para prematuro (3777) está diseñada para niños con bajo peso al nacer y tiene una capacidad de 10 cc. Si la capacidad no es suficiente, considere cambiar a una bolsa de mayor dimensión, como la bolsa para recién nacidos (3778).
- En caso de utilizar la bolsa para prematuro como una bolsa drenable, corte con cuidado el extremo inferior arriba de la unión. Si se corta demasiado, se disminuirá la capacidad de la bolsa.
- Coloque el fleje en el extremo y plieguelo de manera segura. Consulte las instrucciones detalladas de uso que se incluyen en la caja.
- La piel alrededor del estoma no debe estar irritada ni lesionada. Si la piel está irritada, póngase en contacto con una enfermera o un enfermero que se especialice en el cuidado de heridas (o lesiones), ostomía, continencia/terapia enterostomal.
- Los adhesivos **Pouchkins** (incluidos en cada caja) se pueden colocar en la bolsa para identificar la fecha y hora en que se cambió la bolsa.

### Información adicional

- **Cuidado de su hijo con ostomía** (manual educativo para padres y cuidadores de niños con ostomías).
- **¿Pueden seguir jugando y riendo?** (un libro para colorear para niños que quieran saber más sobre las ostomías).

