

zh-CN

使用说明

内容

- Flextend 皮肤保护膜
- 测量指南

产品描述:

耐久型皮肤保护膜用于增加造口袋系统的贴合度。用于与合适的造口袋系统配合使用。使用水胶体皮肤黏胶制成。

适应症及预期用途:

本产品为造口袋系统的附件，用于帮助造口产品贴合皮肤。

警告
重复使用一次性产品可能会对使用者造成潜在风险。例如粘性差。再处理、清洁、消毒和灭菌可能会影响产品特性。可能会导致异味或渗漏。

注: 本产品可剪裁，以增加造口袋系统的贴合度。为确保良好正常的粘性，请使用在清洁过，并擦干的皮肤上。不要使用油或乳液，因为这些产品可能会影响皮肤保护膜的粘性。在短时间内（例如，一天多次）频繁取下 Flextend 皮肤保护膜可能导致皮肤损伤。产品贴合性受许多因素影响（例如造口构造、造口排出物、皮肤状况和腹部轮廓）。有关造口袋系统或皮肤刺激等方面的协助，请与您的造口护士或医务人员联系。

如果您因使用本产品而受到严重伤害（事故），请联系您当地的经销商或制造商，以及当地主管机关。如需更多信息，请参阅 www.hollister.com/authority 的信息，或者联系 EC 代表或当地经销商。


MD

医疗器械
(适用时)


件数

并非采用天然橡胶乳胶制造
CE 标志（按需）


测量和裁剪

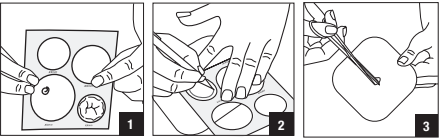


备皮

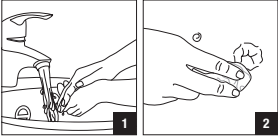

粘贴到皮肤上

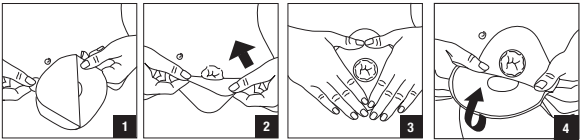

移除和弃置（请遵守所有当地处置法规）

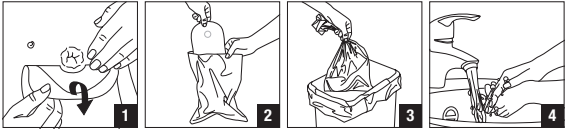

zh-TW

使用說明

內容

- Flextend 保護皮
- 量測線。

產品說明:

專為改善造口袋系統接合性而設計的耐用保護皮。旨在搭配使用合適的造口袋系統。採用水狀膠質皮膚黏合劑。

用途適應症:

此為造口袋系統之附件，適用於協助造口產品貼合皮膚。

警告
重複使用單次使用產品可能對使用者造成潛在風險，例如黏著不佳。再處理、清潔、消毒和無菌處理可能使產品受損，並導致異味或滲漏。

附註: 本產品可以切割，以協助改善造口袋系統接合性。為了確保適當黏合，請於乾淨、乾燥、未受損傷的皮膚上使用。切勿使用油脂或乳液。這類產品可能影響保護皮黏合。短時間內經常取下 Flextend 保護皮 (例如：一天內數次)，可能導致皮膚受損。產品的接合性受到許多因素影響，例如造口構造、造口產出物、皮膚狀況及腹部形狀。如需造口袋系統或皮膚刺激相關協助，請聯絡照顧造口的護理師或醫療保健執業人員。萬一因使用本產品而發生嚴重的傷害 (事故)，請聯絡您當地的經銷商或製造商，並聯絡您當地的主管機關。如需更多資訊，請瀏覽 www.hollister.com/authority 或聯絡 EC Rep 或當地經銷商。

MD

醫療器材
(如適用)


單元數

非由天然橡膠乳膠製造。
CE 標記依要求提供


若要量測與裁切



若要準備皮膚

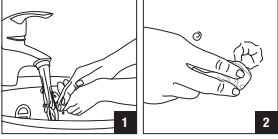

若要於皮膚上使用

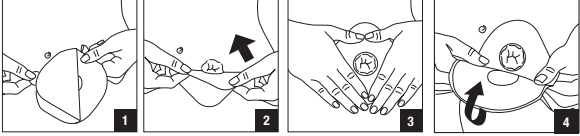

若要取下並廢棄（請遵守所有當地廢置法規）

